

Graphics&Packing Technology Section ICN POLFA RZESZÓW S.A.		<b>ULOTKA PIL</b>		<b>BAUSCH + LOMB</b>	
Nazwa produktu Product Name		Boston Conditioning Solution		Kolor nadruku Colours	
				Black	
Kraj Country (ISO)		Hungary (HU)		Nr wykrojnika Spec No	
				55147	
Opracowane przez Designed by		Mateusz Fron Mateusz.Fron@Valeant.com phone: +48 17 865 5110		Kod Wytwórcy Manufacturer code	
				131085480	
Nr korekty Proof No		1		Data Date	
				13-04-2018	
Kod wersji Valeant version code		P1HU01		Inny kod Other code	
				-	
Rozmiar czcionki Font size		minimum 9,5 pt		Wymiar ulotki PIL size	
				120 x 170 mm	
Krój czcionki Font used		Dax Pro Regular Dax Pro Bold		Gramatura papieru Paper weight	
				- g/m <sup>2</sup>	
Komentarze Comments (Reason for the change)					
- PMR_ICN-18-0444-A - New product					
Akceptacja Techniczna Technical Approval					
Akceptacja Działu ds. Rejestracji Regulatory Affairs Dept. Approval					
<p><b>JÓVÁHAGYOTT</b></p> <p><b>Eva Dios : 17:52, 18/4/18</b></p>					

## BAUSCH & LOMB BOSTON Advance® Comfort Formula kondicionáló oldat

### BAUSCH & LOMB BOSTON Advance® Comfort Formula kondicionáló oldat

A BOSTON Advance® Comfort Formula kondicionáló oldat különleges összetételű készítmény gázáteresztő kemény (RGP) kontaktlencsékhez. Szabadalmazott, multipolimer kényelmi rendszere a lencse felszínére tapadva bevonatot képez, így megkönnyítve a szemre helyezést és biztosítva a fokozott nedvesedést egész napon át.

A BOSTON Advance® Comfort Formula kondicionáló oldat csökkenti a szaruhártya, illetve a szemhéj és a lencse közötti súrlódást, mivel eltávolítja a lencse felszínéről az irritációt kiváltó és a lencseviselést kényelmetlenné tevő szennyező részecskéket. A készítményt az Ön szemével biokompatibilisnek tervezték. Optimalizált tartósító rendszere hatásosan elpusztítja az RGP és kemény kontaktlencsék felszínén meglepedő, ártalmas mikroorganizmusokat. A BOSTON Advance® Comfort Formula kondicionáló oldat fluoro-szilikon-akrilát, szilikon-akrilát, és gázáteresztő kemény kontaktlencsék ápolására javallott, a lencse megtisztítása után. PMMA lencsékhez is ajánlott.

**ÚTMUTATÁSOK ÉS ÖSSZETEVŐK:** A BOSTON Advance® Comfort Formula kondicionáló oldat steril. Összetétele – Fertőtlenítőszer: poliaminopropil-biguanid (0,0005% m/v), klórhexidin-glukonát (0,003% m/v), dinátrium-edetát (0,05% m/v). Egyéb: sók és pufferanyagok, polikvaternium 10, cellulóz viszkozitás-növelő anyag, polivinil-alkohol, derivatizált polietilén-glikol. Ne használja ezt az oldatot, ha allergiás a termék bármelyik összetevőjére!

1. Mossa meg a kezét, mielőtt a kontaktlencséihez nyúlna.
2. Tisztítsa meg a kontaktlencséit a tisztító folyadék használati utasításának megfelelően.
3. Helyezze a lencsüket a kontaktlencsetartóba, majd öntsön rájuk **friss** BOSTON Advance® Comfort Formula kondicionáló oldatot.
4. A megfelelő fertőtlenítés érdekében hagyja ázni a kontaktlencsüket legalább 4 (négy) órán át, mielőtt visszahelyezné azokat a szemére.
5. Amikor kiveszi a lencsüket a kontaktlencsetartóból, öblítse le friss oldattal, mielőtt a szemére helyezné azokat.
6. Minden nap tisztítsa meg alaposan a kontaktlencsetartó belsejét felforralt forró vízzel, majd hagyja megszáradni a levegőn.

Graphics&Packing Technology Section ICN POLFA RZESZÓW S.A.		<b>ULOTKA PIL</b>		<b>BAUSCH + LOMB</b>	
Nazwa produktu Product Name		<b>Boston Conditioning Solution</b>		Kolor nadruku Colours	
				Black	
Kraj Country (ISO)		<b>Hungary (HU)</b>		Nr wykrojnika Spec No	
				<b>55147</b>	
Opracowane przez Designed by		<b>Mateusz Fron</b> Mateusz.Fron@Valeant.com phone: +48 17 865 5110		Kod Wytwórcy Manufacturer code	
				<b>131085480</b>	
Nr korekty Proof No		1		Data Date	
				<b>13-04-2018</b>	
Kod wersji Valeant version code		<b>P1HU01</b>		Kod farmaceutyczny Pharmacode	
				-	
Kod Inny Inny code		<b>P1HU01</b>		Inny kod Other code	
				-	
Rozmiar czcionki Font size		<b>minimum 9,5 pt</b>		Wymiar ulotki PIL size	
				<b>120 x 170 mm</b>	
Krój czcionki Font used		<b>Dax Pro Regular</b> <b>Dax Pro Bold</b>		Gramatura papieru Paper weight	
				<b>- g/m<sup>2</sup></b>	
Komentarze Comments (Reason for the change)					
- PMR_ICN-18-0444-A - New product					
Akceptacja Techniczna Technical Approval					
Akceptacja Działu ds. Rejestracji Regulatory Affairs Dept. Approval					

**ÓWINTÉZKEDÉSEK:** Feltétlenül be kell tartania a kontaktlencsék és lencseápoló termékek szakszerű használatára, továbbá a szeme ápolására vonatkozóan a használati útmutatókban megfogalmazott és a szemésztől kapott útmutatásokat.

- Soha ne használja fel újra ezt az oldatot. A megfelelő fertőtlenítés biztosításához, a lencsék tárolása előtt minden nap teljes egészében cserélje ki az oldatot a kontaktlencsetartóban.
- Soha ne tárolja a kontaktlencséit a tisztító folyadékban.
- A tartályon feltüntetett lejárati időn belül használja fel. A felbontatlan tartályt is ki kell dobni legkésőbb a lejárati napján.
- Felbontás után 90 (kilencven) nappal dobja ki a tartályt és az oldatot.
- Mindenkor ügyeljen a megfelelő higiéniére és a kontaktlencsék szakszerű kezelésére. Ennek elmulasztása esetén a kontaktlencsék és az ápoló oldatok gyakran előforduló baktériumokkal szennyeződhetnek.
- Ügyeljen arra, hogy ez az oldat ne kerüljön a ruházatára, vagy törölközőre, mert foltot hagyhat egyes textíliákon.

**FIGYELMEZTETÉSEK:**


- Ez az oldat nem használható lágy kontaktlencsékkel!
- **GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA TARTANDÓ!**

**HA SZEMPANASZOKAT, VAGY FÁJDALMAT, TÚLZOTT KÖNNYEZÉST, VAGY LÁTÁSZAVART TAPASZTAL, NETÁN KIVÖRÖSÖDIK A SZEME, AZONNAL VEGYE KI A KONTAKTLENCSEIT ÉS AZONNAL KERESSE FEL SZEMÉSZÉT!**

**Kiszereles:**

A BOSTON Advance® Comfort Formula kondicionáló oldat steril, 120 ml-es, vagy 60 ml-es tartályban kerül forgalomba. Nem feltétlenül mindegyik kiszereles kerül kereskedelmi forgalomba. A tartályon szerepel a gyártási tétel száma és a készítmény lejárati ideje.

 Bausch & Lomb Incorporated  
1400 N. Goodman St.  
Rochester NY 14609 USA

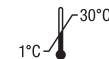

**CE 0050**

 Bausch & Lomb Incorporated  
106 London Road, Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK

**STERILE A**

Olaszországban gyártva.

A Bausch & Lomb, a Boston és a Boston Advance a Bausch & Lomb Incorporated védjegye.

© Bausch & Lomb Incorporated

P1HU01

I31085480